

Comment à propos INSTRUMENTS CHIRURGICAUX prendre le temps de bien nettoyer et stériliser les instruments chirurgicaux est impératif pour assurer les patients n'obtiennent pas les infections ou autres maladies.

Nettoyage manuel (toujours porter des gants protecteurs, robes, faciaux ou lunettes et couvre-chefs)

1. Rincer les instruments immédiatement après usage.
2. Utilisez une brosse à récurer sous l'eau courante pour supprimer tous les de sang et de tissus sur des surfaces et des articulations.
3. Dans un puits ou un bassin, mélange $\frac{1}{4}$ oz de médecine Enzyme détergent – Super concentrés par gallon de chaud à eau chaude. Submerger les instruments dans la solution et laisser pour tremper pendant au moins 2 minutes. Plus de temps peut être nécessaire pour séchées-le sang et les sols organiques.
4. Frotter les instruments avec une brosse ou une éponge.
5. Rincer les instruments sous l'eau, stérile si possible de l'eau et laisser pour sécher.